


## OPMETEN PRO SOCKS & TUBES

Klant zit op een stoel, onderbeen haaks t.o.v. de voet. Meet het been in volgorde 1 t/m 6.

- cD** Meet de omvang van het been 1 cm onder de knieplooi.
- cC** Meet dan de grootste omvang van de kuit.
- cB** Vervolgens meet u de kleinste beenomvang, net boven de enkelknobbels.
- cY** Meet de hiel-wreeflijn. (niet nodig voor tubes)  
Zoek in de tabel z.o.z. de juiste confectiekous.
- LD** Meet de lengte van het been: **kort** (34-39 cm.), **lang** (39,1 - 46 cm.) of **extra lang** (46,1 - 52 cm.)
- Voetmaat** Bepaal de voetmaat, **klein** (36-39), **groot** (40-44)  
**extra groot** (45-48)

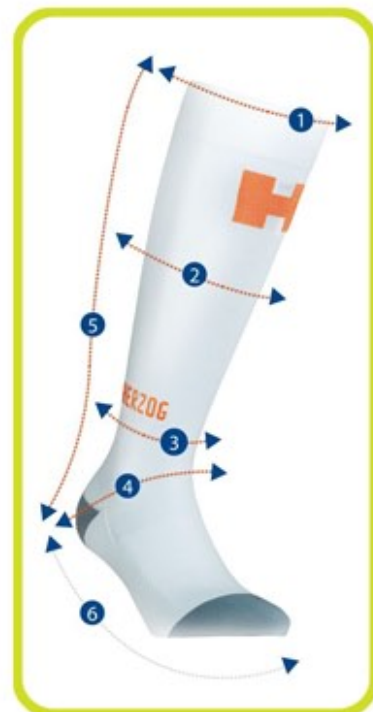

Let op: Soms past het been binnen 2 confectieschema's, kies dan voor die maat waar de kuitomvang (2) zoveel mogelijk centraal binnen het schema valt.



### PRO SOCKS & TUBES

Meetpunten		1	2	3	4	5	6	
<b>1</b>	omvang onder de knie	cD	28 - 35	31 - 38	34 - 41	37 - 44	40 - 47	43 - 50
<b>2</b>	grootste kuitomvang	cC	30 - 37	33 - 40	36 - 43	39 - 46	42 - 49	45 - 52
<b>3</b>	omvang enkel	cB	19 - 21	21 - 23	23 - 25	25 - 27	27 - 29	29 - 31
<b>4</b>	hiel-wreeflijn	cY	28 - 34	30 - 36	32 - 38	34 - 40	35 - 41	37 - 43
<b>5</b>	<b>Beenlengte</b>	gemeten vanaf de grond tot 1 cm onder de knieplooi						
	kort been	<b>34 - 39 cm</b>	kort	kort	kort	kort	/	/
	lang been	<b>39,1 - 46 cm</b>	lang	lang	lang	lang	lang	lang
	extra lang been	<b>46,1 - 52 cm</b>	extra lang	extra lang	extra lang	extra lang	extra lang	extra lang
<b>6</b>	<b>Schoenmaat</b>	<b>EUR</b>						
	kleine voet	<b>36 - 39</b>	klein	klein	klein	klein	/	/
	grote voet	<b>40 - 44</b>	groot	groot	groot	groot	groot	groot
	extra grote voet	<b>45 - 48</b>	/	extra groot	extra groot	extra groot	extra groot	extra groot